



ResQ AI変更点 のご連絡

2021年2月24日

株式会社アドダイス

2/24システム改善について



いつもResQ AIをご活用いただき誠にありがとうございます。

ResQ AIは2月24日にシステム改善を行います。改善点をご連絡いたしますので、ご確認のほどよろしくお願いたします。

本件におけるご意見、お問い合わせはアドダイス担当者までお寄せください。

改善点


1. フィルター機能を追加！

管理者用Platformレポート画面のグラフ表示のUIが使い易くなります！

- a. 過去履歴を見るときカレンダーで日付(月単位・日単位で)選択してみられるようになります！
- b. グラフを同時に表示できるようになります！

2. BP(ResQ Band表記mmHg)のデータ共有が始まります！

【フィルター機能追加】管理者用Platformレポート画面のグラフ表示

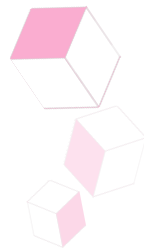

- 過去履歴を見るときカレンダーで日付(月単位・日単位で)選択してみられるようになります！
- グラフを同時に表示できるようになります！

皮膚温

ダッシュボード / レポート / 皮膚温 /

CSVファイルのダウンロード

開始日付*

yyyy/mm/dd --:--



終了日付*

yyyy/mm/dd --:--



間隔*

10分

CSVファイルをダウンロードする

開始日付: 2022/02/09

間隔: 選

< 前 次 >

≡フィルター


グラフ

皮膚温




33 - 37

2022/02/09 - 2022/02/15

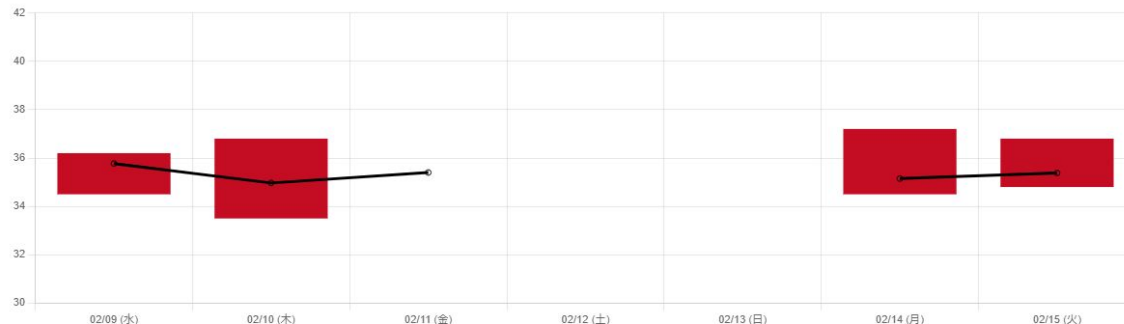



- a. 過去履歴を見るときカレンダーで日付(月単位・日単位で)選択してみられるようになります！

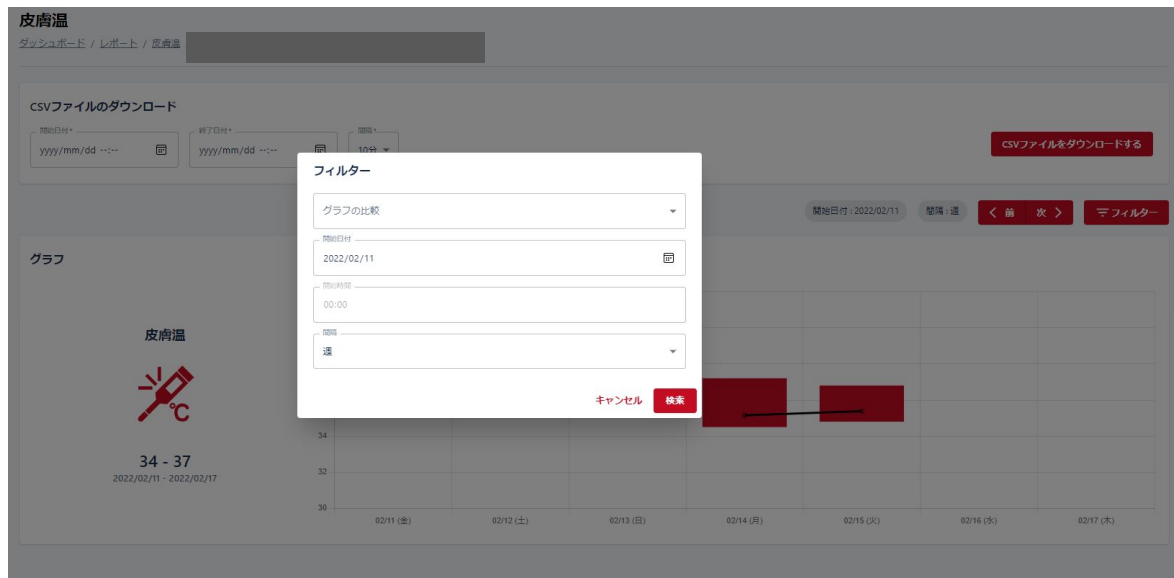

何度も「次へ」を押してさかのぼる必要なし！
欲しい時期を選択できるようになりました。



BP(ResQ Band表記mmHg)のデータ共有が始まります！

BPのデータ共有が可能になりました！

The screenshot displays a mobile application interface for health monitoring. At the top, there is a red navigation bar with notification, globe, and user icons. Below this, a sidebar on the left lists several health metrics with their current values and timestamps. The main content area features a 'レポート' (Report) section with a breadcrumb 'ダッシュボード / レポート'. Below the breadcrumb, six large white cards with red icons represent different health metrics: heart rate (心拍数), skin temperature (皮膚温), blood oxygen saturation (血中酸素濃度), respiration rate (呼吸数), blood pressure (BP), and steps (歩数). At the bottom of the screen, there is a navigation bar with icons for 'レポート', 'バンド', and 'プロフィール', along with standard mobile navigation symbols (back, home, and a menu icon).

項目	値	単位	時刻
心拍数	81 bpm	bpm	2022/02/15 09:30
皮膚温	34.90 °C	°C	2022/02/15 09:30
血中酸素濃度	98 %	%	2022/02/15 09:30
呼吸数	16 bpm	bpm	2022/02/15 09:30
BP	112/75 mmHg	mmHg	2022/02/15 09:30
歩数	143 steps	steps	2022/02/15 09:30



BP (ResQ Band表記mmHg) のデータ共有が始まります！

SBPが上限、DBPが下限の値です。

※BPは個人差が大きい測定項目になりますので、ご提供開始時は全てグリーンゾーンとさせていただきます。

BP

ダッシュボード / レポート / BP





今後も皆様にとって使い勝手の良いソリューションになるよう開発を進めて参ります。

ご不明な点、ご意見等ございましたらアドダイスまでご連絡ください。

引き続きよろしくお願いいたします。

本資料に関するお問い合わせ先

株式会社アドダイス

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-3-6 MKビル3F

E-mail ; sales@ad-dice.com