

Res⁺Band 取扱説明書

第4.0版



Res⁺Live
レスキュー・ライブ

ResQ Bandは、スマートフォンアプリ「ResQ Live(レスキュー・ライブ)」と同期することを前提としているため、同期後にResQ Bandの表示が本取扱説明書の内容に変更されます。同期前の表示および測定値等については、保証いたしかねますので予めご了承ください。



- 充電時のUSB充電アダプターは2A以下を使用して下さい。2Aを超えるものを使用すると故障の原因となります。
- 水で濡れた状態で充電しないでください。
- 本品は日常生活防水です。入浴時や手洗い時など ResQ Band が著しく濡れる際は、はずしてご利用ください。



ad³dice


各部紹介



測定のコツ

ResQ Bandには、高品位で高精細なセンサーを使用しております。なるべく、肌と密着させるようにご利用ください。受光窓と肌の上に遮るものがない方が、より正確に計測できます。


温度感知部分

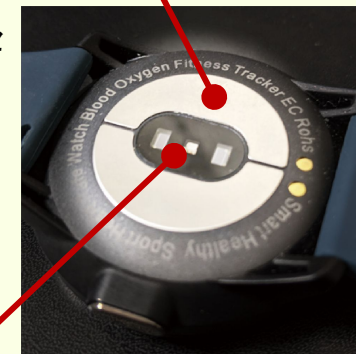

充電について

はじめて使用する前に充電が必要です。付属のマグネット充電ケーブルを、背面の金属製部分の充電口(●)に取り付け、お手持ちのUSB充電アダプターを使用して充電してください。


(パソコンのUSBポートからの充電も可能です) 充電時間は約2~3時間です。

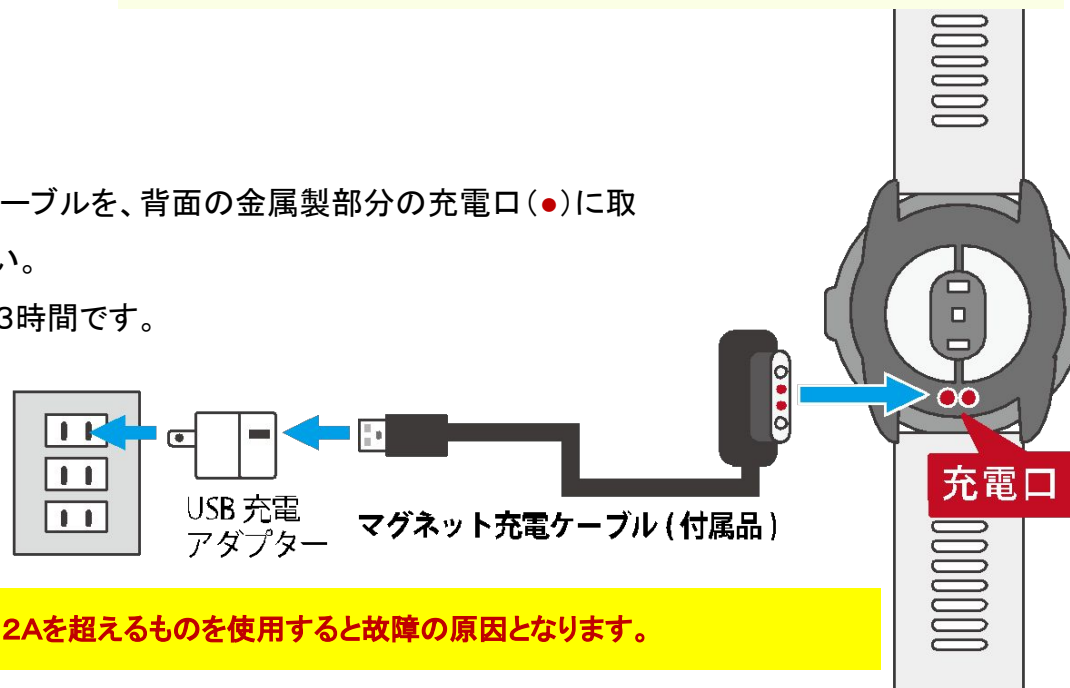

- 充電時のUSB充電アダプターは2A以下を使用して下さい。2Aを超えるものを使用すると故障の原因となります。


メイン画面

メイン画面でタッチスクリーンを長押しすると、デザインが切り替わります。5つのスタイルがあります。

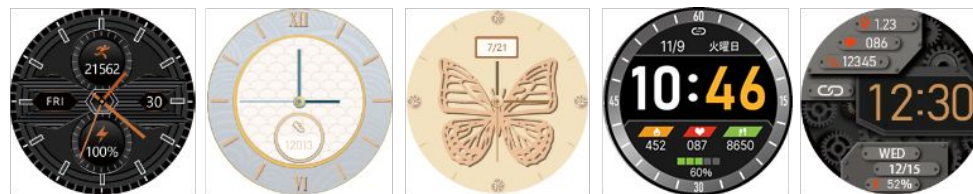


機能画面<概要>

メイン画面でタッチスクリーンを長押しすると、デザインが切り替わります。5つのスタイルがあります。それぞれのアイコンをタップすると、測定数値など詳細に切り替わります。

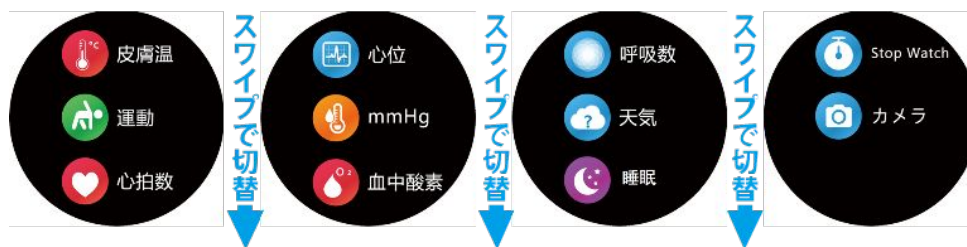

メイン画面と機能画面の切り替え方法

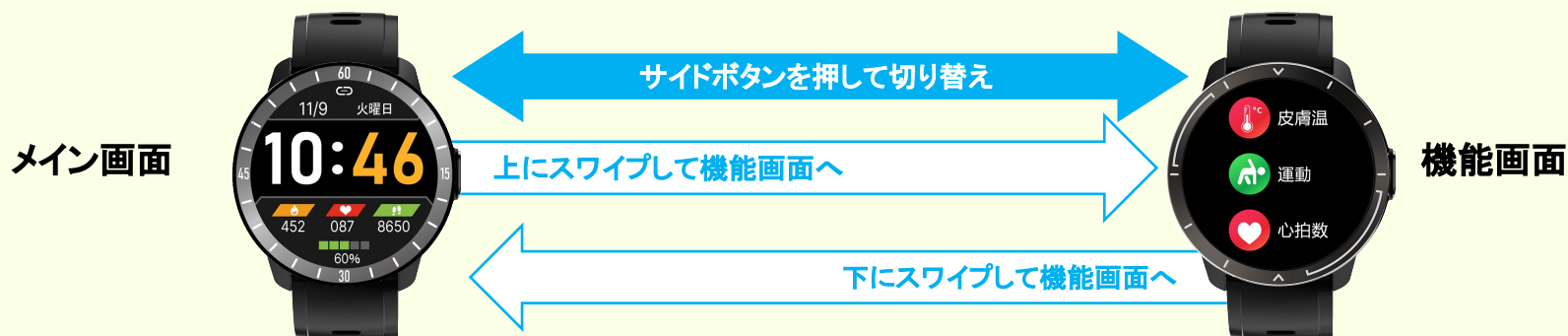

機能画面<①ResQ Liveと連動する機能>

以下の5項目は、ResQ Liveと連動し、推移をスマートフォンで表示することができます。

(1)心拍数レポート


心拍数を測定、表示します



(2)皮膚温レポート

皮膚温度を測定、表示します。


注: ◆皮膚温をテストする場合、バンドが皮膚と完全に接触している状態で 10分間装着する必要があります。◆外気温との温度差の影響を受けることがあります。◆測定値は参考の数値になります。医療データとして使用することはできません。

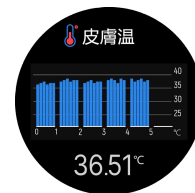

(3)血中酸素濃度レポート


血液酸素を測定、表示します。

注: ◆測定値は参考の数値になります。医療データとして使用することはできません。

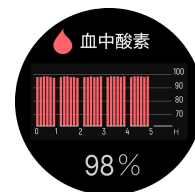

(4)呼吸数レポート

呼吸数を測定、表示します。

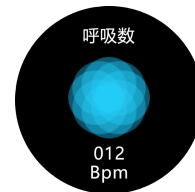

(5)歩数レポート

一日ごとに、歩行距離・歩数・燃焼カロリーを測定、表示します。


注: ◆ResQ Liveと連動するのは「歩数」のみとなります。



(6)BP(Beat Power)レポート

心臓の活動強度を測定し、上限・下限で表示します。単位はBP(Beat Power)

注: ◆BP測定時:測定中は体をリラックスさせてください。できるだけ心臓と同じ高さに ResQ Bandを保ち、静かに測定してください。◆測定値は参考の数値になります。医療データとして使用することはできません。

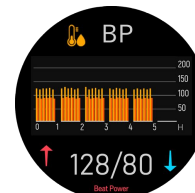

- ※ ResQ Bandはヘルスケア用品です。医療機器ではありません。
- ※ 医療機器とは計測手法などが違うため、医療機器で計測した値と大きな差異があります。
- ※ ResQ Bandは高品位のセンサーを搭載し良質なデータを収集できます。しかし、収集したデータを解析して医療機器としてお役に立てるレベルには達していません。
- ※ 将来的にAIでの解析を進めることにより精度を向上させる構想はありますが、現状で表示される値の精度は低く表示されます。医療機器としては利用できません。

以下の項目は、任意でお使いいただけます。


◆運動

時間、消費カロリー等が計測できます。




◆睡眠

浅い睡眠、深い睡眠、トータル時間が計測できます。

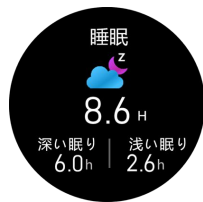

◆ストップウォッチ

秒数を計測できます。左→右スワイプで終了します。

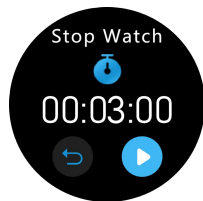

◆設定

輝度:画面の輝度を＋ボタンで調節します。

リセット:工場出荷時の状態に戻します。

◆シャットダウン

ResQ Bandの電源をオフにします。

以下の項目はResQ Bandではサポートされていません。

天気情報/カメラ/情報/メッセージ/手首上げ/お休み/心位


ResQ Band「モデル番号」の確認方法

固有の番号です。お問い合わせの際などに必要です。


①下へスワイプ



②「詳細」タップ

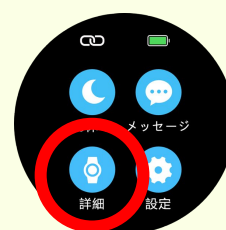

③モデル番号表示

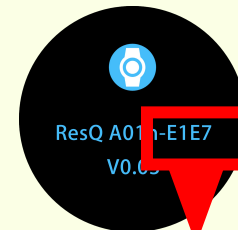

モデル番号例(4桁英数) **E1E7**

充電長持ちのコツ

「設定」から以下2点を行うと、充電電池の使用量を抑えることができます。

①「輝度」を「1」にします。

②「Wake Screen」を「OFF」にします。



ResQ Bandに関するお問い合わせは、右のQRコードを読み取り「お問い合わせフォーム」からお送りいただくか、以下のメールアドレスまで、ご質問をお送りください。

resq-support@ad-dice.com

※誠に恐縮ではございますが、ご回答には、数日のお時間を頂戴する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本マニュアル記載の画面、内容等は、予告なく変更する場合があります。



ResQ AIサポート

その他、ResQ AIに関する最新のサポート情報を下記サイトにて掲載しております。

バージョンアップ情報、不具合情報、よくお寄せいただく質問(FAQ)

ResQ Band取扱説明書ダウンロード、専用アプリ「ResQ Live」のダウンロード など。

<https://ad-dice.com/resq-ai-support/> (右記QRコードからもアクセスできます)



ResQ Bandは体調管理のためできるだけ装着を推奨いたしますが、24時間つけていることを必須とするものではありません。就寝時もデータを取得したい場合は、ご利用いただいても構いません。

<本社> 〒110-0005 東京都台東区上野5-4-2 IT秋葉原ビル1F
<Labo> 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-3-6 MKビル3F

株式会社アドダイス